



# danumed® Verlängerungs-Set für Gastrostomie-Button

**Sicherheit trifft Komfort**

Widerstandsfähiges Konnektormaterial aus TRITAN™ ✓

Knickstabiler Schlauch aus Polyurethan ✓

Innovativer Drehring **ENSwivel**® ✓

Deutscher Hersteller ✓

Kurze Lieferkette ✓

Optimierte Button-Konnektoren, gerade und rechtwinklig ✓

Lange Anwendungsdauer bis zu 14 Tagen ✓




Frei von Latex, PVC, DEHP und BPA

# danumed® Verlängerungs-Set

Das danumed® Verlängerungs-Set ist für die enterale Ernährung, Medikamentengabe und Dekompression in Verbindung mit einem Gastrostomie-Button konzipiert.

Innovative Funktionen optimieren die Durchflussrate der Nahrung und vereinfachen die Handhabung für die Pflegekraft.

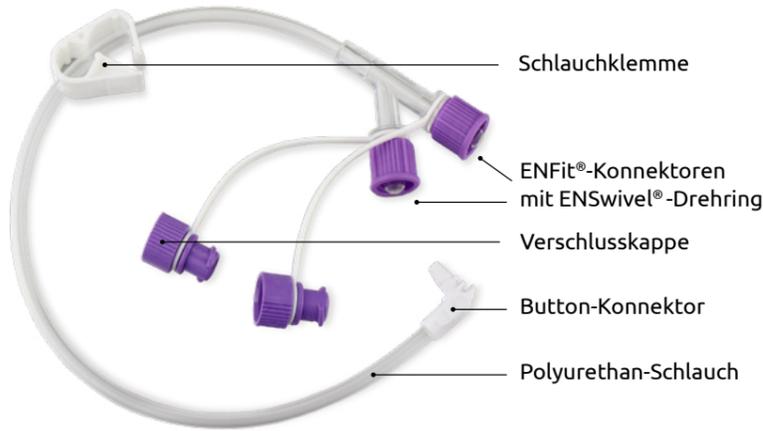


**Hochwertige Materialien ermöglichen eine Verwendungsdauer von bis zu 14 Tagen:**

- Konnektormaterial aus TRITAN™**
- extrem widerstandsfähig gegen aggressive Medikamente
  - beugt Materialbrüchen vor

- Schlauchmaterial aus Polyurethan**
- äußerst knickstabil
  - biokompatibel, ohne Schadstoffe
  - bleibt weich (OHNE Weichmacher)


## Innovativer Drehring ENSwivel®

- Für optimalen Patientenkomfort und einfache Handhabung
- Sichere, dichte Verbindung mit einer simplen „Zwei-Finger-Drehung“. Einfach, sicher, bequem.
- Verdrehen der Schläuche wird vermieden, da NUR der ENSwivel® gedreht wird und nicht das gesamte System
- Angebracht auf allen ENFit®-Konnektoren

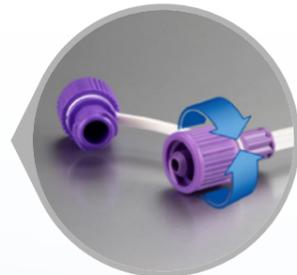

## Formoptimierter Button-Konnektor

- Gerundetes Innenprofil für optimierten Durchfluss
- Einfache, sichere und dichte Fixierung am Button

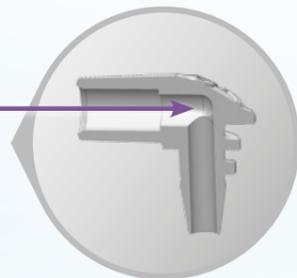


## Zahlreiche Ausführungen und Längen

- Mit ENFit®-Konnektoren in verschiedenen Versionen: ENFit®, Y-ENFit®, Bolus-ENFit®
- In verschiedenen Längen verfügbar: 5cm, 30cm und 60cm





## Produktvarianten

### Bolus-Ernährung mit Spritze

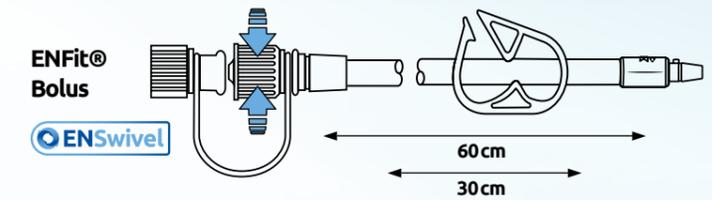

### Kontinuierliche Ernährung mit Pumpe oder Schwerkraft

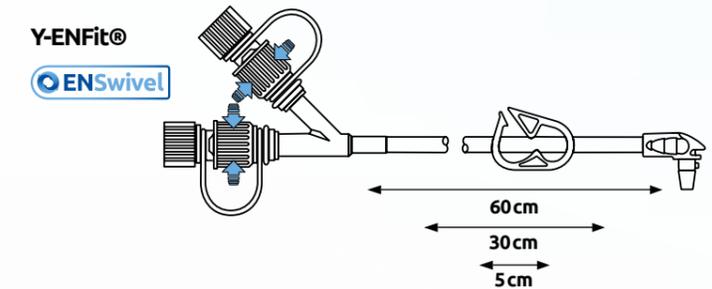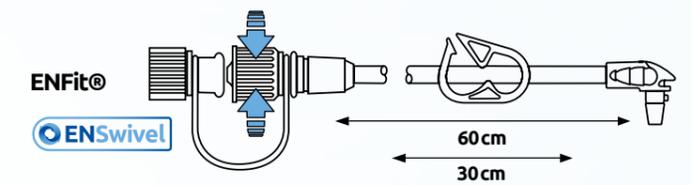

### danumed® Verlängerungs-Set mit rechtwinkligem Button-Konnektor

REF	PZN	Produktbezeichnung	Länge	Konnektor
DA 1011 3011	16230096	Verlängerungs-Set <b>steril</b> , 30 cm, ENFit®, ENSwivel®	30 cm	ENFit®
DA 1010 3011	16230067	Verlängerungs-Set <b>unsteril</b> , 30 cm, ENFit®, ENSwivel®	30 cm	ENFit®
DA 1011 6011	16230104	Verlängerungs-Set <b>steril</b> , 60 cm, ENFit®, ENSwivel®	60 cm	ENFit®
DA 1010 6011	16230073	Verlängerungs-Set <b>unsteril</b> , 60 cm, ENFit®, ENSwivel®	60 cm	ENFit®
DA 1011 0521	16581335	Verlängerungs-Set <b>steril</b> , 5 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	5 cm	Y-ENFit®
DA 1011 3021	16230044	Verlängerungs-Set <b>steril</b> , 30 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	30 cm	Y-ENFit®
DA 1010 3021	16230021	Verlängerungs-Set <b>unsteril</b> , 30 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	30 cm	Y-ENFit®
DA 1011 6021	16230050	Verlängerungs-Set <b>steril</b> , 60 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	60 cm	Y-ENFit®
DA 1010 6021	16230038	Verlängerungs-Set <b>unsteril</b> , 60 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	60 cm	Y-ENFit®

Die Verlängerungs-Sets sind mit einem winkligen Button-Konnektor und mit **normal-lumigem Schlauch** ausgestattet. Die Verlängerungs-Sets sind einzeln verpackt. 10 Stück in der Schachtel, 10 Schachteln im Versandkarton.

### danumed® Verlängerungs-Set mit geradem Button-Konnektor

REF	PZN	Produktbezeichnung	Länge	Konnektor
DA 1011 3032	16230133	Verlängerungs-Set <b>steril</b> , 30 cm, Bolus-ENFit®, ENSwivel®	30 cm	Bolus ENFit®
DA 1010 3032	16230110	Verlängerungs-Set <b>unsteril</b> , 30 cm, Bolus-ENFit®, ENSwivel®	30 cm	Bolus ENFit®
DA 1011 6032	16230162	Verlängerungs-Set <b>steril</b> , 60 cm, Bolus-ENFit®, ENSwivel®	60 cm	Bolus ENFit®
DA 1010 6032	16230127	Verlängerungs-Set <b>unsteril</b> , 60 cm, Bolus-ENFit®, ENSwivel®	60 cm	Bolus ENFit®

Die Verlängerungs-Sets sind mit geradem Button-Konnektor und mit **großlumigem Schlauch** ausgestattet. Die Verlängerungs-Sets sind einzeln verpackt. 10 Stück in der Schachtel, 10 Schachteln im Versandkarton.



## **danumed Medizintechnik GmbH**

*Individuelle Lösungen sind bei uns der Standard.*

Wir sind ein familiengeführtes, innovatives, deutsches Medizintechnik-Unternehmen mit hohem Qualitätsanspruch, langjähriger Expertise in der enteralen Ernährung und ausgeprägter Kundenorientierung.

Auch individuelle Kundenwünsche werden flexibel und zuverlässig erfüllt.  
Persönlich, kompetent, partnerschaftlich.

**danumed Medizintechnik GmbH** • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Germany  
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81

[info@danumed.com](mailto:info@danumed.com) • [www.danumed.com](http://www.danumed.com)